

Une approche globale des soins

Prise en charge de l'incontinence

ABENA®

BECAUSE WE CARE

Sommaire

- 4 A propos d'Abena
- 6 Philosophie Abena
- 8 Environnement
- 9 Qualité
- 10 Accompagnement & Formations Abena
- 12 Outils & Supports
- 14 Caractéristiques gamme incontinence
- 15 Protections anatomiques - Incontinence légère
- 16 Sous-vêtements de maintien
- 17 Protections anatomiques - Incontinence lourde
- 18 Changes complets
- 19 Culottes absorbantes
- 20 Changes complets avec ceinture
- 22 Protections de la literie
- 24 Soins de la peau
- 25 Toilette du corps
- 26 Gants à usage unique
- 28 Hygiène et protection de la personne
- 30 Gestion des déchets

Depuis décembre 2019, Abena-Frantex est certifiée FSC™



FSC™ (Forest Stewardship Council) est une organisation internationale non gouvernementale dédiée à la promotion de la gestion responsable des forêts dans le monde. Les produits certifiés FSC™ sont fabriqués à partir de matières premières provenant de forêts bien gérées et de sources responsables. La traçabilité et l'intégrité du label sont préservées grâce à des mesures de contrôle rigoureuses. De plus, en choisissant des produits certifiés FSC™, vous aidez à prendre soin des forêts, mais aussi des personnes et de la faune autochtones. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fsc.org



ABENA®

Bienvenue chez Abena !

Abena est une entreprise familiale danoise basée à Aabenraa, dans le sud du Danemark. Elle a été créée en 1953 par la famille Terp-Nielsen et aujourd'hui, Abena possède des filiales et des bureaux de vente répartis dans le monde entier. Une décennie de croissance constante a fait du groupe Abena l'un des principaux fabricants européens de produits d'hygiène. Ses sites de production sont situés au Danemark (protections pour l'incontinence, couches bébé), en France (alèses jetables) et en Suède.

Le principal objectif d'Abena est le bien-être de l'utilisateur final grâce à la fabrication de produits d'hygiène de qualité supérieure dotés des dernières caractéristiques techniques disponibles sur le marché.

Nous avons notre propre équipe d'infirmier(e)s et d'aides-soignant(e)s, qui travaille directement avec les établissements pour les accompagner dans la mise en place de la meilleure solution pour chaque résident incontinant.



Chez Abena, il y a des actes concrets derrière les mots **Développement Durable.**

Notre stratégie est d'avoir le profil environnemental le plus fort sur le marché.



Les valeurs d'Abena **Confiance, Equité, Coopération**

Les valeurs d'Abena imprègnent notre travail et nos relations avec tous nos partenaires.

L'ensemble des équipes Abena adhère à ces valeurs au quotidien.

La vision d'Abena

Vous fournir une solution complète de prise en charge de l'incontinence, via une large gamme de produits d'hygiène à usage unique, de haute qualité, et un accompagnement personnalisé.



**LE 1ER PRODUIT
D'INCONTINENCE AU
MONDE, CONNECTÉ EN
TEMPS RÉEL, JETABLE ET À
UTILISATION JOURNALIÈRE**



- Gain de temps
- Moins de fuites
- Moins de changes
- Meilleur sommeil



Améliorer la prise en charge de l'incontinence

Abena Nova avec MediSens est le leader du marché de la gestion de la continence au quotidien.

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE DE CAPTEURS INTÉGRÉS

Abena Nova utilise une connexion sans fil unique via des capteurs intégrés pour fournir des informations utiles en temps réel aux soignants. Les capteurs sont dans le produit; ils mesurent en continu son niveau d'humidité et envoient en temps réel l'information aux soignants sur leurs smartphones ou leurs tablettes. Ces derniers peuvent alors proposer un soin personnalisé en fonction des besoins individuels et des meilleures pratiques dans le domaine.

Plus de temps pour des soins personnalisés

Nos études montrent qu'Abena Nova améliore la qualité de vie des résidents. Il allège également la charge de travail des soignants, ce qui leur permet de libérer du temps pour des soins d'une qualité encore plus élevée.

Une meilleure qualité de vie malgré l'incontinence

En offrant des informations concrètes et la possibilité d'être changé au bon moment, le besoin de vérifier manuellement est réduit au minimum. Le résultat est une réduction du temps passé avec un produit humide, moins de lits mouillés et moins de fuites.

" Je passe énormément de temps avec les résidents. Maintenant, au lieu de passer ce temps à contrôler leurs changes, je peux l'utiliser pour tout autre chose, et c'est beaucoup plus agréable pour le patient mais pour moi également."

Britta Andersen, aide-soignante à l'Ehpad Lergården, Aabenraa, Danemark

"Des innovations comme la couche intelligente peuvent améliorer la qualité de vie, le sentiment de liberté et l'autonomie de nos clients"

Ms. Greet Prins, Président du Conseil d'administration, Philadelphia Zorg

NOMINÉ POUR



LAURÉAT DE



LAURÉAT DE



LAURÉAT DE



Philosophie Abena

OFFRIR UN CONCEPT GLOBAL DE SOLUTIONS POUR LA PRISE EN CHARGE DE L'INCONTINENCE

Il n'existe pas une seule prise en charge de l'incontinence, tout comme il n'existe pas 2 personnes semblables.

L'anatomie, la peau ou bien même le degré d'incontinence sont différents d'une personne à l'autre ; les différences d'âge, de personnalité, de style de vie et même de circonstances conduisent à une approche personnalisée des soins de continence.

Placer le résident au cœur de ses priorités et offrir un soin individualisé sont les clés d'une amélioration de la qualité des soins associée à une réduction des coûts.

Des solutions intelligentes et individuelles constituent la base de l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du soin.

Par le biais d'une approche globale, nous visons à améliorer la qualité de vie des personnes incontinentes en permettant aux établissements et aux personnels soignants d'offrir la meilleure prise en charge possible de l'incontinence.

Une approche globale qui prend en compte tous les aspects de la personne, parmi lesquels son régime alimentaire, son activité physique, les soins apportés à sa peau, son style de vie ainsi que sa qualité de vie.

Également, elle prend en compte le rôle du soignant et met l'accent sur la prévention ainsi que sur le traitement approprié des affections liées à l'incontinence.

LES 3 COMPOSANTES DE LA PHILOSOPHIE ABENA

1 Bientraitance : Le résident et son bien-être au cœur de nos préoccupations

Le résident est la première personne à souffrir de sa perte d'autonomie et son incontinence y est souvent liée. Ces maux peuvent influencer sur son estime de soi. Notre objectif est de permettre à ces résidents de maintenir leur autonomie, assurer leur confort, leur bien-être et leur dignité ; parce que notre métier a avant tout vocation à améliorer la qualité de vie des résidents incontinents.

Des pratiques simples permettent de faire la différence :

- Ecoute active du résident (respect du projet de vie)
- Choix de la protection adaptée, protocoles individualisés
- Favoriser l'accompagnement aux toilettes
- Respecter le sommeil de la personne âgée

2 Conseils & préventions: L'accompagnement et la formation du personnel soignant

Puisque sans personnel soignant formé, il n'y a pas de soins adaptés, nous nous attachons à prendre en compte les besoins et contraintes des équipes pour effectuer les bons soins au quotidien. Nous travaillons ensemble pour :

- Former à la bonne utilisation des différents produits (incontinence, soins de la peau, hygiène...)
- Favoriser le maintien de la continence des résidents
- Permettre la continuité des soins et son organisation
- Favoriser la communication entre le personnel soignant
- Préconiser l'organisation et les méthodes de travail adaptés (horaires de change, communication avec le résident et la famille...)

3 Maîtrise budgétaire & prise en charge globale : L'établissement au cœur de notre savoir-faire

Une bonne prise en charge de l'incontinence signifie aussi, pour l'établissement, une bonne maîtrise de ses ressources. Notre savoir-faire est aussi de lui apporter les outils nécessaires pour contrôler son budget de fonctionnement et gérer ses équipes :

- Former les équipes pour optimiser les pratiques de soins et en réduire les coûts
- Fournir un programme de suivis de la prise en charge de l'incontinence
- Maîtriser le coût incontinence journalier (CIJ)

Le choix et la combinaison adéquats des produits de continence

Faire le bon choix parmi les différents types, tailles et degrés d'absorption en fonction de l'utilisateur. Sans oublier les produits de fixation et la protection de la literie.

Une approche structurée de l'hygiène

Assurer une bonne hygiène dans l'établissement, depuis le port des gants et la protection du personnel soignant, jusqu'à la gestion des déchets.



Toilette & soins de la peau adaptés

Faciliter la toilette et les soins quotidiens quel que soit le degré d'autonomie du résident. Prévenir les affections cutanées douloureuses telles que la dermatite associée à l'incontinence (DAI) et améliorer la qualité de vie du résident.

Abena,

une production écologique et durable
dans le monde entier



Nos produits sont conformes à une large liste d'écolabels : FSC, écolabel européen, écolabel Nordic Swan, et bien d'autres encore.

Les processus de fabrication sont axés sur l'optimisation de l'utilisation des matières premières et la recherche d'alternatives respectueuses de l'environnement.



L'usine de production danoise d'Abena fonctionne uniquement à l'énergie éolienne. Notre site de production français, situé dans l'Oise (60), utilise 100% d'électricité verte, d'origine hydraulique. Avoir une production écologique fait partie de notre ADN.

Chez Abena, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement. Notre activité principale consiste à gérer une production durable basée sur une énergie verte afin de donner à nos produits le début de cycle de vie le plus propre possible.

Dans le cadre du Pacte Mondial des Nations Unies, Abena suit les 10 principes basés sur les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.



Un développement sûr et durable grâce à une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et à l'élimination des déchets.



Se concentrant sur la réduction des niveaux de CO2 : par exemple, au Danemark, nous avons réduit les émissions de CO2 de 19 % depuis 2008.

Nos usines sont conformes aux normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.



LABELLISÉ NORDIC SWAN DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Le label écologique Nordic Swan est le label écologique nordique officiel. Quand Abena, en **1998**, a obtenu le label écologique Nordic Swan, c'était la première fois au niveau mondial que le très convoité écolabel était attribué aux couches pour bébés.

Deux ans après, Abena a été la première entreprise à acquérir le label écologique Nordic Swan pour les protections pour incontinence.

Lorsque vous choisissez un produit avec le label écologique Nordic Swan, vous faites le meilleur choix possible en matière d'impact environnemental et vous pouvez être sûr que le produit que vous avez choisi est parmi les meilleurs dans sa catégorie.



Aujourd'hui, 80% de nos produits pour l'incontinence et **100%** de nos matières premières portent le Label Nordic Swan. Cela fait de nous le plus grand fabricant européen de produits d'hygiène absorbants portant cet écolabel.

Nous proposons plus de **2 500 produits** certifiés, avec entre autres des produits de toilette, de soins de la peau et d'essuyage corporel.



Qualité Abena

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Abena est certifié ISO 9001:2015. Cette certification garantit une approche systématique de la qualité et de l'assurance qualité, ainsi qu'un niveau de qualité élevé et constant des services et des produits.

Nous avons cartographié et décrit tous les processus essentiels, c'est-à-dire la planification, l'achat, la production, la maintenance, le développement de produits.

Nous avons clairement défini les spécifications relatives aux matières premières et aux produits finis. Nos tests en laboratoires internes et externes attestent que nos produits répondent à nos propres exigences et à celles de nos clients.

NOTRE PRODUCTION

Abena-Frantex

Abena-Frantex est une société française basée à Nogent sur Oise, au nord de Paris. Abena-Frantex fait partie du groupe Abena depuis 1992, mais fabrique des alèses jetables depuis plus de 40 ans.

Abena-Frantex a récemment investi dans une machine innovante et de haute technologie qui peut produire environ 500 000 pièces par jour. Les alèses sont utilisées comme protection de la literie dans les Ehpad, les cliniques et les hôpitaux.

Abena-Frantex est certifiée ISO 9001 et 14001 et prévoit d'être certifiée ISO 13485 dans le courant de l'année 2020.

Abena Finess Hygiene

Finess Hygiene est une entreprise suédoise basée à Kisa, au sud de Stockholm. Finess fait partie du groupe Abena depuis 1999. Finess Hygiene produit des draps de protection jetables, des lingettes, des gants de toilette et des bavoirs.

Finess Hygiene est certifié ISO 9001, 13485, 14001 et FSC sur une sélection de produits spécifiques.



Abena Production A/S

Abena dispose de 14 lignes de production ultramodernes au siège social d'Aabenraa, au Danemark, qui ont une capacité de production totale de 4,5 millions de pièces par jour. Nous fabriquons des produits d'incontinence et des couches pour bébés depuis le début des années 1980.

Les lignes de production sont parmi les plus avancées technologiquement et les plus automatisées. Cela nous permet de maintenir un environnement de production innovant, agile et efficace.

En outre, Abena dispose d'un centre logistique entièrement automatisé. Situé juste à côté de nos installations de production, il permet des synergies entre les deux départements.

Abena Production A/S est certifiée ISO 45001, 9001, 14001 et devrait être certifiée ISO 13485 en 2020.

Accompagnement Abena



ACCOMPAGNEMENT TERRAIN

Les équipes Abena vous accompagnent et vous conseillent tout au long de la relation. Nos équipes terrain, composées d'infirmier(e)s et aides-soignant(e)s, sont expérimentées et formées à offrir des solutions qui s'adaptent parfaitement aux projets des établissements. L'objectif étant avant tout d'offrir une meilleure qualité de vie aux résidents, tout en accompagnant le personnel soignant dans son quotidien.

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATIONS

La gestion de la continence Abena ne se résume pas uniquement à fournir des protections d'incontinence. L'accompagnement et la formation sont deux éléments indispensables pour une bonne prise en charge de l'incontinence.

L'organisme de formation **Abena Conseil**, pour l'accompagnement du résident et bien plus encore.

Abena Conseil s'appuie sur 40 ans d'expérience en structures de soin. Nos formatrices sont des aides-soignantes ou des infirmières régulièrement au contact des établissements. Leur expérience pratique constitue la spécificité de nos formations.


Parce que vous devez, au quotidien, contrôler votre budget de fonctionnement et former vos équipes de soignants.

Les formatrices Abena Conseil ont pour mission d'optimiser les pratiques de soins et donc, au final, d'en réduire le coût. Cette démarche se fait avec une ligne directrice constante : le respect du patient et du résident.

Composé de formations présentielles et formations e-learning

LES ÉTAPES D'UNE COLLABORATION AVEC LES ÉQUIPES ABENA

Le début de la collaboration...

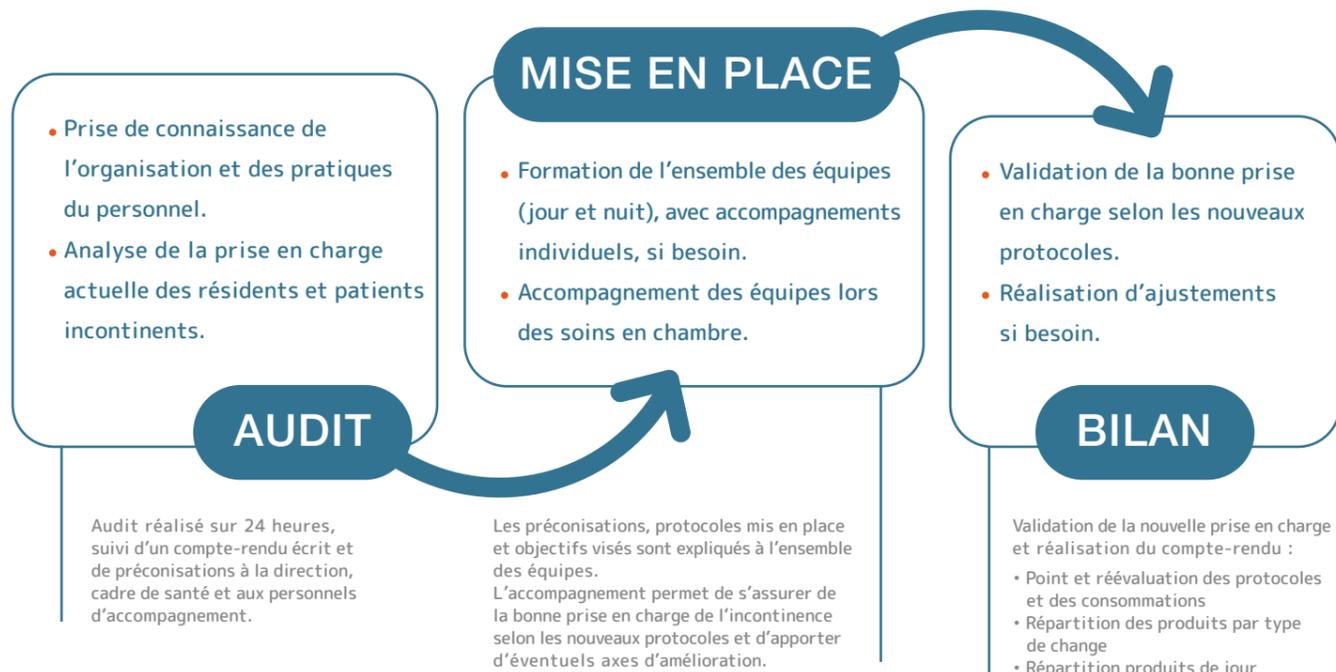

...Et par la suite



Soit, au total, un minimum de 2 visites/an.

Les bénéfices de la collaboration

- Mise en place de protocoles individualisés et optimisés.
- Respect des protocoles & maîtrise du budget.
- Méthodes de prise en charge adaptées et ajustées.
- Maintien de la dignité du résident.
- Mise en place de référents incontinence.



INFO : Abena Conseil est référencé DATADOCK, c'est-à-dire qu'il répond aux critères qualité du décret du 30 juin 2015. L'organisme de formation Abena Conseil est donc référencé par les financeurs de la formation professionnelle continue.

Abena Conseil est habilité par l'Agence nationale du Développement Professionnel Continu (n° DPC :5376) pour dispenser des formations de DPC aux professionnels de santé.

Outils & Supports Abena

En plus des produits d'incontinence et de l'accompagnement réalisé autour de la prise en charge de l'incontinence, Abena met à disposition une large gamme de supports d'aide pour faciliter le quotidien du personnel soignant et la gestion quotidienne de l'établissement.

ACCESSIBLE DEPUIS LE WEB, ELLE OFFRE :

ABENA SOINS, VOTRE PLATEFORME DE RÉFÉRENCE

Il est important de pouvoir surveiller étroitement les coûts financiers dus à la consommation des changes. La plateforme Abena Soins, un outils complet qui permet une vue globale et une prise en charge totale de l'incontinence pour votre établissement.

Une vue d'ensemble de votre établissement

- Structure de votre établissement (étages, sections, groupes, chambres).
- L'ensemble de vos résidents.
- L'ensemble de vos dotations et protocoles de soins (feuilles de dotation, fiches de chambres, feuilles de test).

Un récapitulatif de la consommation de votre établissement

- Suivi des consommations (suivi des quantités et besoins).
- Création et transmission de commande selon les besoins réels
- Calcul du budget prévisionnel annuel.
- Analyses des consommations (coût incontinence journalier, coût incontinence par résident, coût incontinence par GIR).

Le point central de votre relation avec Abena

- Historique de vos commandes.
- Accès à votre tarif et catalogues produits.
- Accès en temps réel aux dernières actualités et informations.



SIMPLES ET EFFICACES, ILS PERMETTENT :

SUPPORTS D'AIDE : OUTILS ET BONNES PRATIQUES

En plus de l'accompagnement, Abena a développé différents supports, à l'aide de ses infirmières et des différents personnels soignants, s'appuyant sur les principes de base des soins.

D'évaluer le degré et le type d'incontinence

Tableau des mictions, test de pesée des changes, étude de consommations des changes.

De garantir des soins optimum


Guide de choix de la protection, techniques de pose, protocoles de soins de la peau, feuille de test individuel.

De rappeler les bonnes pratiques

Respect du sommeil, l'accompagnement aux toilettes, horaire de change, utilisation de gants, respect du protocole.

De transmettre des informations pratiques

Utilisation des grandes serviettes (bavoires), lingettes, toilette sans rinçage, gestion des déchets, gestion des excréta.

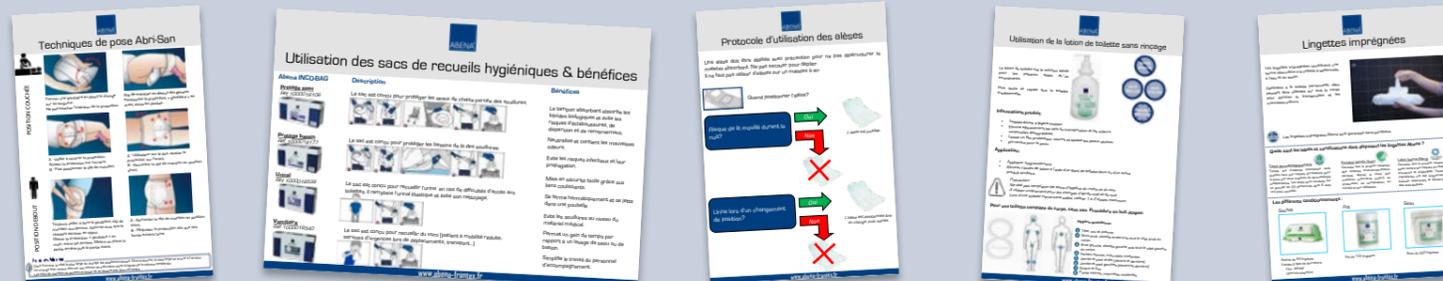

Caractéristiques et avantages des produits d'incontinence Abena

Toute la gamme Premium Abena est spécialement conçue avec pour objectif principal le bien-être du résident. Nous avons choisi les technologies produits et les engagements éco-responsables qui permettent d'apporter une meilleure qualité de vie à l'utilisateur tout en facilitant le quotidien du personnel soignant.

LES PRODUITS PREMIUM OFFRENT UN HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ ANTI-FUITES ET UN CONFORT MAXIMUM

Testé dermatologiquement



Cela signifie que toutes les matières premières sont testées face aux risques d'irritations pour la peau. Les tests sont conduits sur un groupe de 20 personnes dont 6 ayant une peau sensible. Ils sont réalisés sur l'ensemble des matières premières étant au contact direct avec la peau.

Ecolabellisé Nordic Swan depuis 20 ans



Cela garantit que le produit respecte des critères environnementaux stricts, depuis le choix des matières premières jusqu'à sa production, sa composition, sa sûreté et son utilisation. Une protection ecolabellisée ne contient pas de substance type parfum, lotion, ou de substances chimiques controversées (Règlementation REACH).

Air Plus - Entièrement respirant



Les protections absorbantes Premium sont entièrement respirantes afin de préserver la peau. Leur voile externe aéré à sensation textile permet à la peau de respirer et d'évacuer la chaleur plus rapidement.

Témoin de saturation avec échelle de graduations



Le témoin de saturation, associé à l'échelle de graduations, permet au personnel soignant de contrôler la capacité d'absorption utilisée et de le guider vers le bon choix de protection. L'échelle respecte le code couleur du produit rendant son identification extrêmement simple.

Top Dry - Absorption rapide et effet garde au sec



Les protections absorbantes Premium sont dotées d'une couche d'acquisition et de distribution en non-tissé, située sous le voile de surface. Elle améliore la capacité du produit à absorber le liquide plus rapidement et à le répartir sur une plus grande surface permettant un retour au sec rapide. La personne se sent au sec et sa peau est préservée de l'humidité.

Barrières anti-fuites



Les protections absorbantes Premium disposent de barrières efficaces conçues pour retenir le liquide tout le long du coussin absorbant, les élastiques assurent un ajustement optimal au corps et minimisent les risques de fuite.

Grande capacité d'absorption et système anti-odeur



Les microbilles super absorbantes (SAP) utilisées dans les protections absorbent 35 à 50 fois leur propre poids. Au contact de l'urine, les microbilles réagissent et l'encapsulent pour se transformer en une structure gélatineuse capturant ainsi ses odeurs.



Cœur absorbant enveloppé « dual Wrapped core »

La technologie Dual Wrapped Core consiste à positionner et optimiser la zone absorbante là où elle est le plus nécessaire. Au centre du coussin absorbant, le « cœur absorbant » est à présent enveloppé d'un film non-tissé. Des microbilles superabsorbantes (SAP) sont ensuite injectées aux points précis où les liquides doivent être rapidement absorbés. L'absorption est totale là où elle est essentielle. En plus d'optimiser l'absorption, l'enveloppement du cœur absorbant permet une meilleure stabilité du coussin dans son ensemble, limitant ainsi les risques de déstructuration, tout en offrant une protection optimale contre les fuites.

Cette technologie est disponible dans nos culottes absorbantes taille M et L et dans nos changes complets taille M et L pour les absorptions 0,1 et 2.

Protections anatomiques adhésives

Les protections anatomiques adhésives se fixent dans le sous-vêtement.


- Testées dermatologiquement, éco-labellisées « Nordic Swan » et conçues à partir de fibres de cellulose éco-responsable (FSC™) pour garantir la protection la plus saine possible.
- Fines et discrètes, elles neutralisent les odeurs pour le confort du quotidien.
- 100% respirantes avec maintien au sec pour préserver l'intégrité de la peau.

Personnes autonomes


Capables de se déplacer seules aux toilettes et de gérer seules leur protection.



La gamme Abena se compose de protections adhésives féminines et de protections adhésives masculines, chacune avec ses propriétés uniques :

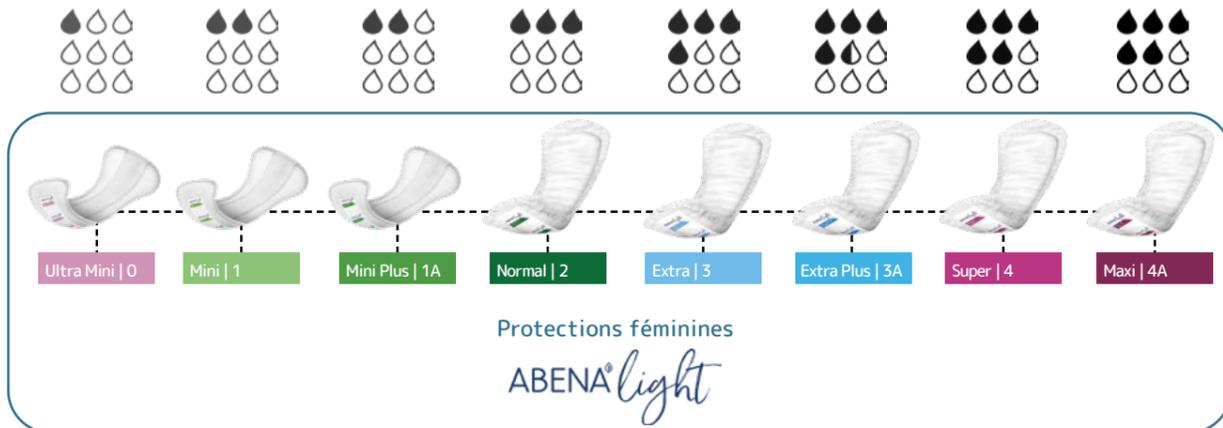

- Protection unique contre les fuites grâce aux barrières très douces qui s'étendent sur toute la longueur de la protection.
- Facile à porter, discrète et hygiénique avec un emballage individuel. (sauf ultra-mini et maxi)*

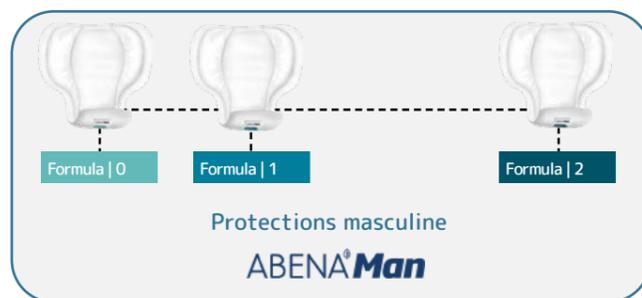


- Système unique de barrières anti-fuites avec poches intégrées.
- Dispersion ultra rapide grâce à son voile de surface micro-perforé.

Sous-vêtements de maintien ABRI-FIX

Un dispositif médical essentiel pour la sécurité.

En tant que dispositifs médicaux, toutes les protections anatomiques devraient être utilisées avec un sous-vêtement de maintien adapté, comme étant la seconde partie du soin de continence.

Comparés aux sous-vêtements ordinaires, ces sous-vêtements sont dotés d'un entre-jambe plus large, d'une élasticité supplémentaire et d'une zone de stabilisation afin d'assurer le bon maintien de la protection et d'offrir une sécurité optimale contre les fuites.

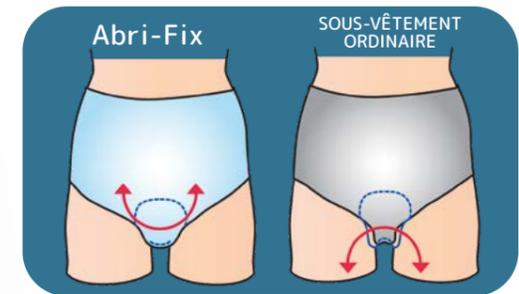

Les besoins et les souhaits peuvent varier largement, cela dépend de la condition physique de l'utilisateur, de son type d'incontinence et de l'utilisation.

La gamme de sous-vêtements de maintien Abri-Fix a été conçue en collaboration étroite avec les utilisateurs, le personnel soignant et nos propres infirmiers spécialisés pour apporter une réponse aux différents besoins et proposer un soin individualisé et adapté à la personne.

- Couvre les différents besoins et situations des utilisateurs.
- Grande étendue de tailles, pouvant aller du XS au 6XL.
- Modèles spéciaux dont une gamme de sous-vêtements intégraux type grenouillère.
- Certifiée par le label indépendant Oeko-tex, class II.



Identification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements



Protections anatomiques

Les protections anatomiques s'utilisent avec un sous-vêtement de maintien adapté.

Elles constituent :

- Le soin le plus confortable pour l'utilisateur tout en préservant sa dignité.
 - La solution la plus pratique pour le personnel soignant avec une technique de pose simplifiée et des accompagnements aux toilettes facilités.
 - Le coût le plus maîtrisé pour l'établissement avec une gamme répondant à chaque besoin. La réutilisation du sous-vêtement de maintien permet un usage à long terme.
- Testées dermatologiquement, éco-labellisées « Nordic Swan » pour garantir la protection la plus saine possible.
 - Forme anatomique, barrières anti-fuites et système anti-odeur pour le confort et la sécurité.
 - 100% respirantes avec maintien au sec pour préserver l'intégrité de la peau.


Personnes semi-autonomes ou alitées



Aucun appui possible, selles liquides régulières, positions vicieuses.



La gamme de protections anatomiques Abena est capable de répondre à la majorité de vos besoins, elle se compose de protections mixtes, bariatriques, protections masculines et d'une protection spécifique à l'incontinence fécale :

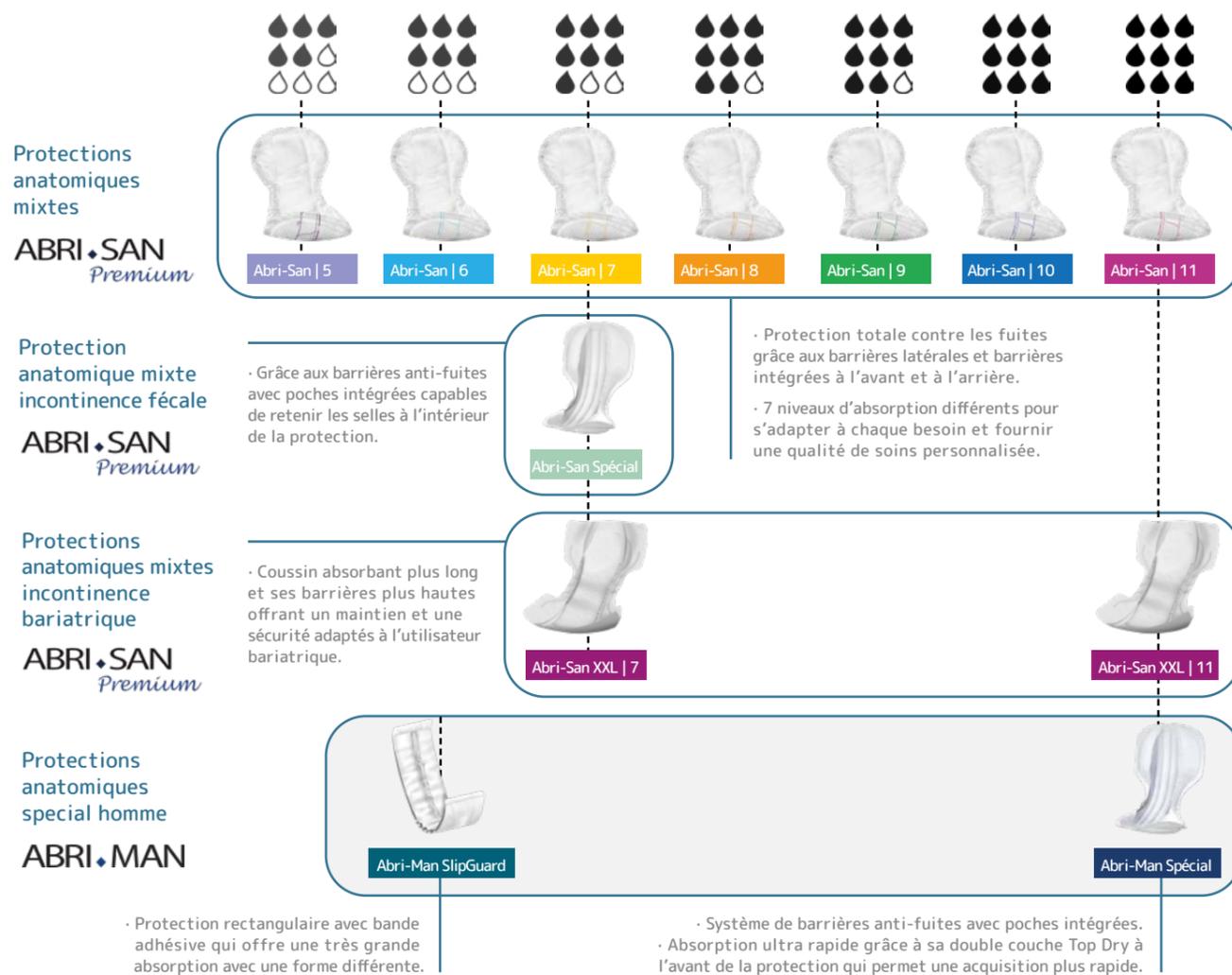

Changes complets

ABRI-FORM Premium

Les changes complets constituent le soin de continence le plus lourd et infantilisant.

Nous considérons que sa banalisation va à l'encontre du respect de la dignité de la personne incontinente et met en péril son autonomie « continence ». Ils ne devraient être utilisés que lorsque que l'accompagnement aux toilettes est difficile voire impossible.

- Testés dermatologiquement, éco-labellisés « Nordic Swan » pour garantir la protection la plus saine possible.
- Coussin anatomique, attaches extensibles repositionnables pour le confort et la sécurité.
- 100% respirants avec maintien au sec pour préserver l'intégrité de la peau.


Personnes dépendantes ou alitées



Aucun appui possible, selles liquides régulières, positions vicieuses.



La gamme de changes complets Abri-Form est conçue pour vous apporter une sécurité optimale contre les fuites et ce dans des situations très exigeantes. Les changes complets sont disponibles en 7 tailles et jusqu'à 5 niveaux d'absorption différents, dont une taille spéciale junior et une taille bariatrique, pour s'adapter à chaque besoin individuel :

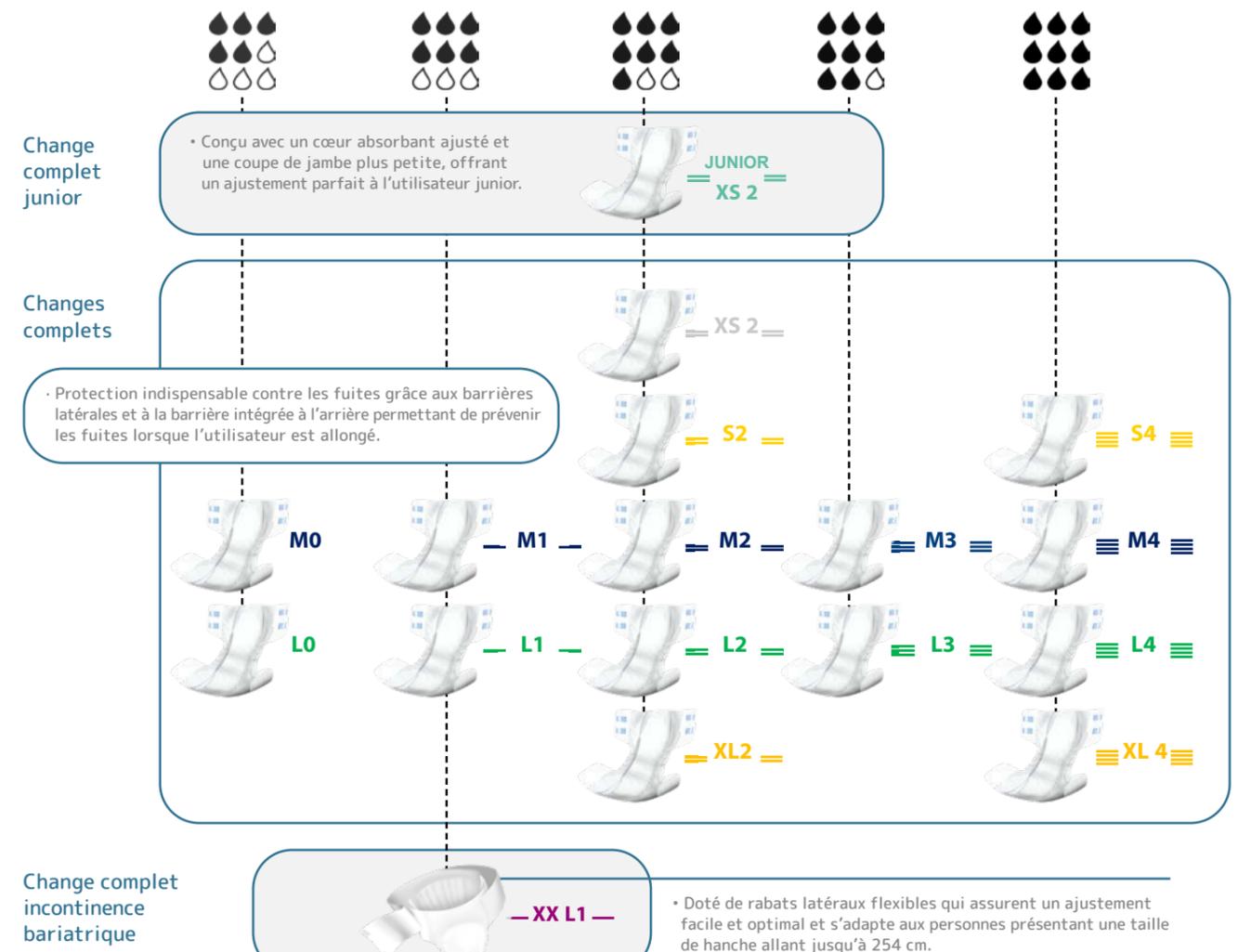

Culottes absorbantes

ABENA® Pants ABRI•FLEX Premium

Les culottes absorbantes s'utilisent comme un sous-vêtement traditionnel.

Elles permettent de renforcer les sentiments de liberté et de dignité tout en préservant l'autonomie de l'utilisateur.


- Testées dermatologiquement, et conçues à partir de fibres de cellulose éco-responsable (FSC™) pour garantir la protection la plus saine possible.
- Ceinture hautement élastiquée et revêtement très doux pour le confort et la discrétion.
- 100% respirantes avec maintien au sec pour préserver l'intégrité de la peau.

Personnes autonomes ou semi-autonomes

Incapacité de gérer seul une protection adhésive, réflexe de demander l'accompagnement aux toilettes, personnes désorientées



La largeur de gamme des culottes absorbantes Abena permet de vous proposer une solution adaptée au besoin de chaque utilisateur. Elle compte jusqu'à 4 niveaux d'absorption différents et propose des modèles répondant à des contraintes spécifiques, telles que l'incontinence junior ou l'incontinence bariatrique :

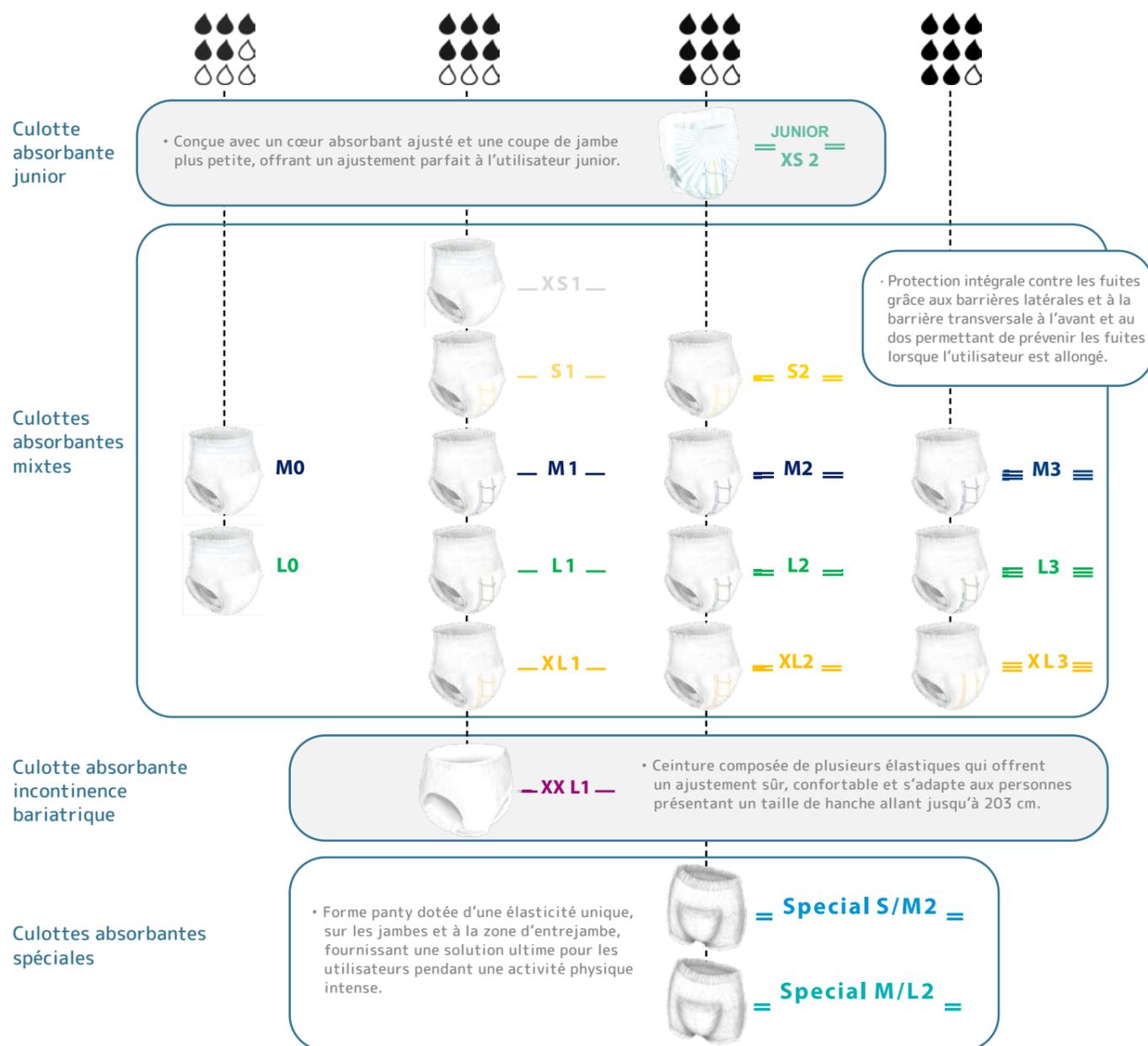

Changes complets avec ceinture ABRI•WING Premium


Avec leur propriété de maintien unique, les changes complets avec ceinture peuvent être une alternative aux changes complets traditionnels. Ils constituent une excellente solution pour les utilisateurs capables de s'auto-gérer et d'appliquer leur protection eux-mêmes.

- Testés dermatologiquement, pour garantir la protection la plus saine possible.
- Ceinture très douce et robuste assemblée depuis l'arrière de la protection pour un ajustement optimal.
- 100% respirants et maintien au sec pour préserver l'intégrité de la peau.

Personnes semi-autonomes



La gamme de changes complets avec ceinture Abri-Wing est disponible en 4 tailles et jusqu'à 4 niveaux d'absorption différents et permet de proposer une solution personnalisée, adaptée au besoin de l'utilisateur :

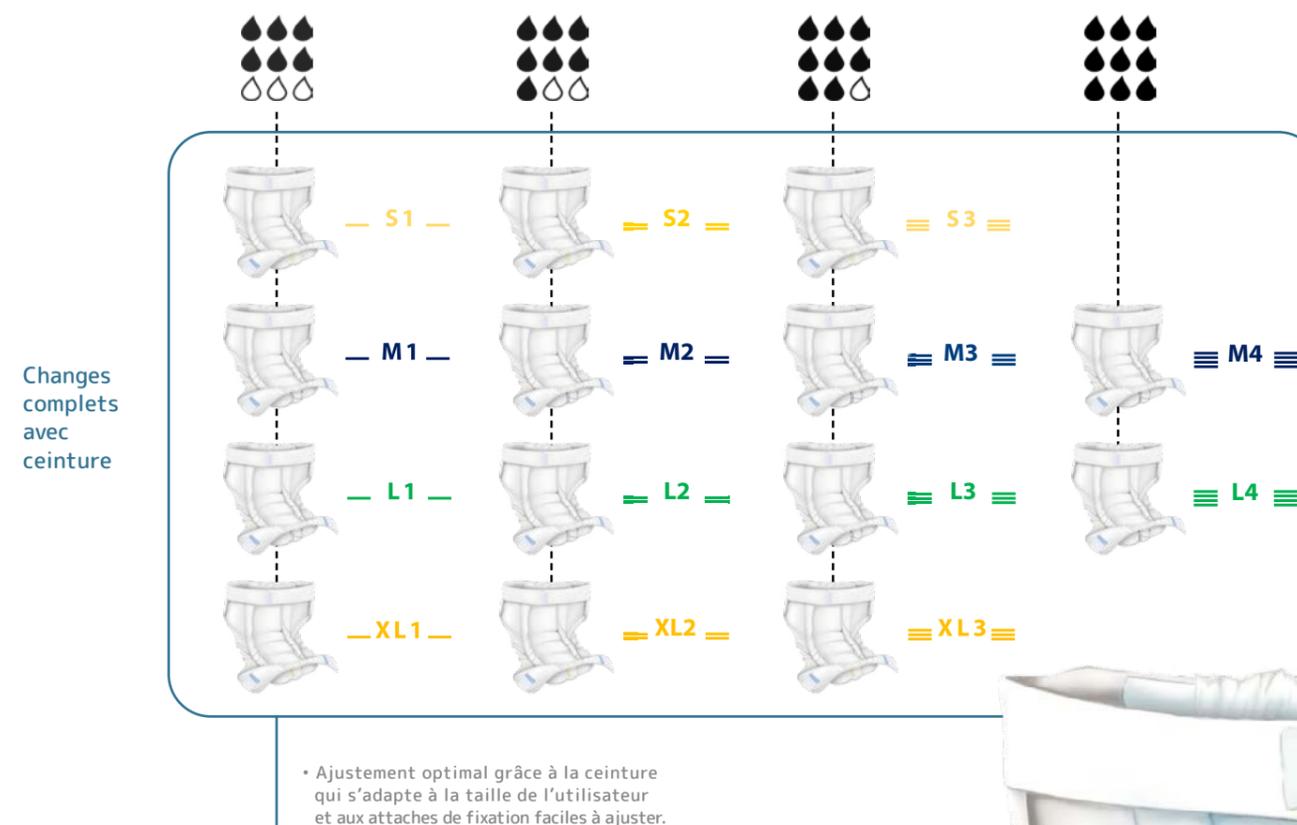

Protections de la literie

Élément essentiel d'une approche globale des soins de continence, les protections de lit jetables et lavables améliorent la qualité de vie et facilitent le quotidien des résidents et du personnel soignant. La protection de la literie procure du confort à l'utilisateur tout en allégeant la charge de travail du personnel de santé. L'utilisation d'alèses jetables réduit le risque de contamination.

- Testées dermatologiquement, éco-labellisées « Nordic Swan » et conçues à partir de fibres de cellulose éco-responsable (FSC™) pour garantir la protection la plus saine possible.
- Bords scellés pour une protection optimale contre les fuites.
- Voile de surface fait en non tissé doux pour un confort accru de l'utilisateur.

Dans quels cas utiliser nos produits?

Pour une protection renforcée chez les personnes souffrant d'incontinence, pour les procédures médicales, pour la toilette des patients alités et pour les soins autour du lit ou à proximité. Les alèses jetables peuvent être utilisées comme protection pour les lits et les chaises.




ALÈSES JETABLES ABRI•SOFT

La largeur de gamme d'alèses jetables Abri-soft permet de répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs et des établissements. Elle se compose de différentes dimensions et absorptions :



Avec microbilles absorbantes (SAP) et canaux de diffusion

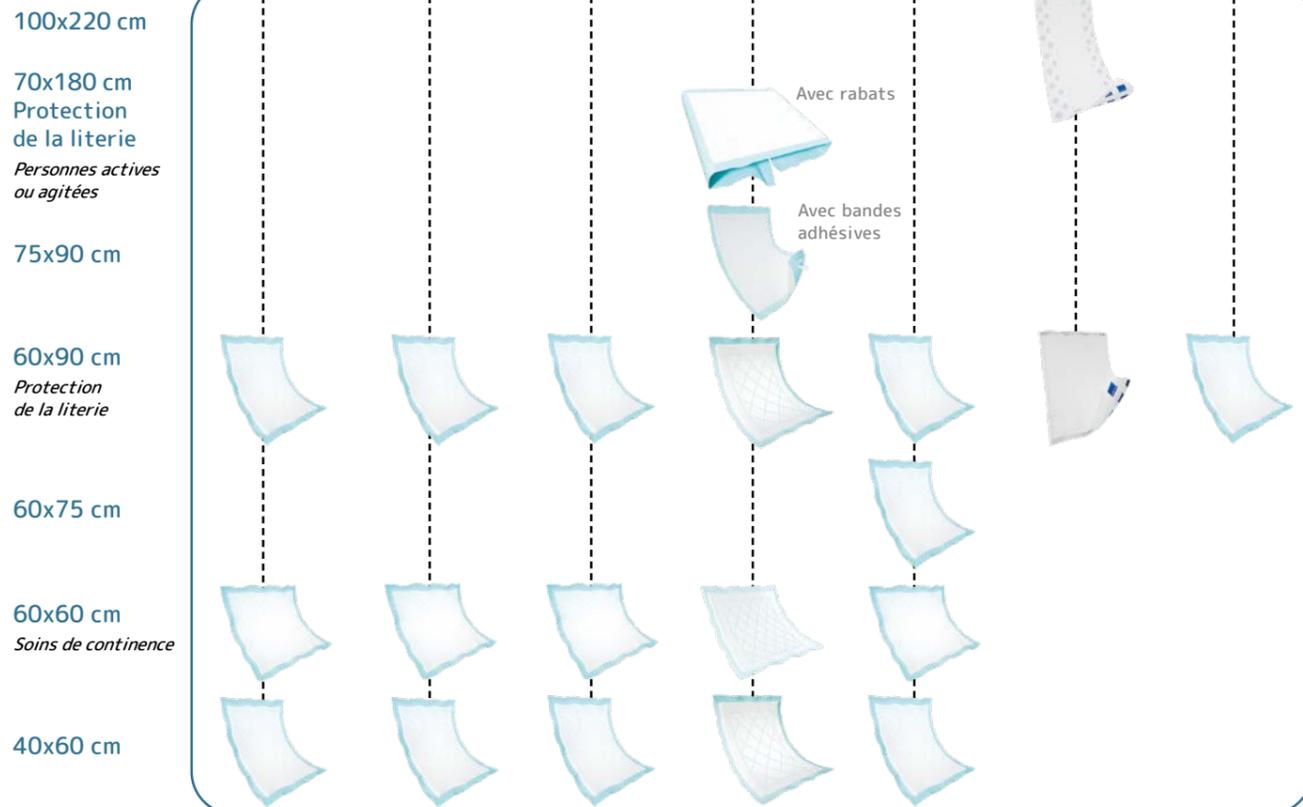

ALÈSES LAVABLES

ABRI•SOFT washable

Les alèses comportent une couche de protection contre les liquides, qui est également respirante. La surface est douce et confortable, assurant à l'utilisateur un confort optimal. Les angles arrondis permettent de réduire l'usure au lavage. Elles sont discrètes et réutilisables.

Elles sont disponibles en dimensions 85x75 cm : dans une version à rabats latéraux, idéale pour les utilisateurs actifs ou agités, car ils empêchent l'alèse de bouger. Elles sont également disponibles dans une version avec poignées ce qui facilite le repositionnement de l'utilisateur dans le lit, et en format 45x45 cm pour protéger les fauteuils roulants, les sièges et les chaises.

Elles peuvent être lavées plus de 300 fois, jusqu'à 95°C.




PROTÈGES-DRAPS JETABLES ABRI•BED

Nous proposons une gamme complète de protège-draps à usage unique absorbants, composés de polyéthylène et de fibres de cellulose. Equipés pour certains de barrières anti fuites et de fils de renfort pour protéger les matelas, repositionner et/ou transférer les utilisateurs.

Les protections de literie Abena, ce sont aussi :

- Des rouleaux d'examen imperméables et non imperméables.
- Du linge de lit (draps plats, draps-housses, taies d'oreiller) et couvertures à usage unique.

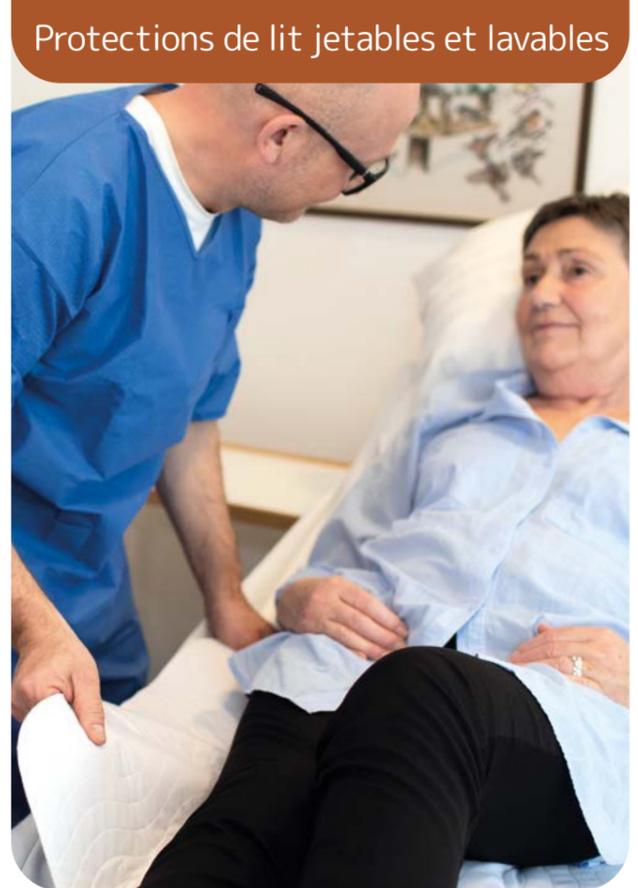

Soins de la peau

Crèmes, lotions et pommades

La peau est le plus grand organe du corps et protège celui-ci contre les infections. Elle joue un rôle essentiel dans l'état de santé général. De bonnes habitudes de soins et d'hygiène de la peau sont essentielles au maintien de la santé du corps dans sa globalité.

La gamme de soins de la peau Abena a été développée par des spécialistes pour constituer le premier choix en termes de douceur et de santé. Nos aides-soignantes et nos experts produits sont prêts à vous aider pour mettre au point le protocole de soin adapté à vos habitudes. Ces produits aident la peau à se régénérer et à rester en bonne santé : protéger ce qui est le plus proche de vous, c'est notre mission.

- Tous les produits sont soumis à un contrôle qualité et à des tests approfondis incluant des tests dermatologiques.
- Produits de soins sans danger en termes d'allergies ainsi que pour l'environnement.
- Gamme large allant des soins quotidiens aux traitements spéciaux.



Crèmes & lotions

Crèmes & pommades spéciales

LE SAVIEZ-VOUS ?

25% des résidents en Ehpad souffrent de DAI.

La Dermatite Associée à l'Incontinence est une affection douloureuse et onéreuse de la peau qui se produit suite à une exposition à l'urine et/ou aux selles.

Un certain nombre de facteurs peuvent favoriser le développement de la DAI :

- Le changement irrégulier des produits d'incontinence.
- Un nettoyage insuffisant.
- L'utilisation de produits de soins pour la peau inappropriés.
- L'utilisation de savon, d'eau, de gants et de serviettes rugueuses.

LES CONSEILS DES SPÉCIALISTES

- 1. Nettoyer doucement la peau, de préférence sans eau.**
Le rinçage à l'eau et au savon et l'essuyage avec une serviette peuvent endommager la peau. Il est recommandé d'utiliser des nettoyants sans rinçage comme des gants de toilette ou lingettes imprégnés. Il est important de choisir des produits au pH neutre pour la peau et sans parfum.



- 2. Appliquer une crème ou une lotion pour protéger la peau.**
Avant application des produits hydratants, s'assurer que la peau est parfaitement propre et sèche. Veiller à utiliser une crème, une lotion ou un spray au pH neutre pour la peau. Les produits à vaporiser sont faciles à utiliser et provoquent moins de frictions sur les peaux sensibles.
- 3. Appliquer une crème, une lotion ou un spray pour faciliter la régénération de la peau.**
Utiliser une crème, lotion ou un spray protecteur adapté. Les sprays à base d'oxyde de zinc sont très efficaces et ne nécessitent pas de rinçage. Veiller à appliquer la quantité appropriée de crème/lotion/spray ; autrement dit, ni trop, ni trop peu. Une quantité excessive peut empêcher la peau de respirer.

Toilette du corps

Cosmétiques et essuyage corporel

L'hygiène personnelle est essentielle à la qualité de vie et chaque personne devrait pouvoir faire sa toilette, quelle que soit sa condition physique. Or l'accès à la douche n'est pas toujours une évidence.

Notre gamme de produits de toilette corporelle est basée sur une approche globale. En proposant des solutions de toilette simples et sûres de A à Z, il est possible de minimiser le stress et la fatigue physique pour le personnel soignant et le résident. Elle a été développée afin de répondre et de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur.

- Des gammes de produits hypoallergéniques et écolabellisés.
- Des produits durables et une devise : « faire mieux avec moins », en évitant les additifs inutiles.
- Des emballages intelligents et hygiéniques prêts à l'emploi et faciles à jeter.



Produits de toilette sans eau

Produits de toilette prêts à l'emploi

Produits de toilette traditionnelle à l'eau

Lotions, mousses et gels douches sans rinçage. Carrés d'essuyage.

Lingettes, gants de toilette imprégnés, coiffes lavantes.

Savons liquides, mousses et shampoings avec rinçage. Gants de toilette et carrés d'essuyage.

Pour les personnes incontinentes, cette toilette peut être complétée par l'usage d'un gant de toilette chauffant imprégné de diméthicone à 3%.


Ce dernier est formulé pour nettoyer la zone périnéale et protéger la peau de l'exposition à l'urine et aux selles grâce à la barrière protectrice qu'il laisse. Avec son design en relief, il permet de retenir les saletés.

C'est un produit 3 en 1 : il permet de laver, soigner et protéger.

LES CONSEILS DES SPÉCIALISTES

Pour les personnes ayant besoin d'assistance pour réaliser leur toilette, le lavage sans eau est à privilégier. En effet, la toilette sans eau permet de maintenir l'hygiène personnelle des résidents et d'économiser des efforts et du temps.

Voici la procédure en 8 étapes pour une toilette complète du corps sans eau, à vous de choisir : un gant de toilette et une lotion sans rinçage (ou une mousse de toilette ou un savon sans rinçage) ou bien des lingettes ou des gants de toilette imprégnés.

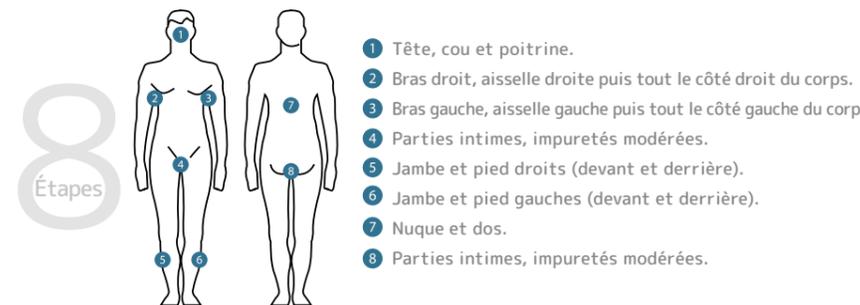

Gants à usage unique

Gants médicaux

Il devient de plus en plus essentiel au sein des établissements de santé de prévenir la contamination croisée et la transmission des infections. En matière d'hygiène et de prévention des infections, les gants constituent votre meilleur allié.

Les gants jouent un rôle déterminant car ils garantissent votre sécurité et votre hygiène dans tous les domaines : soins médicaux, manipulation des aliments, nettoyage des surfaces... Des gants de haute qualité et adaptés aux besoins sont essentiels pour assurer aux patients, au personnel soignant et aux visiteurs un environnement sûr et hygiénique.

Choisir les gants Abena, c'est :

- Le **choix au sein d'une large gamme** comprenant différentes matières et différents modèles destinés à des applications spéciales ou à assurer une protection renforcée.
- La **praticité au quotidien** grâce au code couleur des boîtes permettant d'identifier votre taille facilement.
- La **garantie d'utiliser des produits conformes à la législation en vigueur** relative aux gants médicaux et de protection (certification, normes et rapports de tests).

Le choix de la matière des gants doit être fait en fonction de la tâche à effectuer, des éventuels risques d'allergies du personnel soignant, et doit être conforme au protocole en vigueur au sein de l'établissement.



COMMENT CHOISIR LE BON GANT ?

Application

	Nitrile	Latex	Vinyle
Soins infirmiers / Nursing	R	R	P
Manipulation de fluides corporels dont le sang	R	R	NR
Cytostatiques (chimiothérapie)	R	NR	NR
Crèmes à base d'huile (dont les crèmes hormonales)	R	NR	NR
Nettoyage rapide	R	R	R
Faible protection contre les produits chimiques	Voir fiche produit		
Contact alimentaire	R	R	P*

- R** Utilisation Recommandée
- P** Utilisation Possible
- NR** Utilisation Non Recommandée

* Seulement pour les aliments non-gras

Gants antimicrobiens

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Le principal vecteur de transmission des maladies nosocomiales est le contact direct ou indirect entre les patients, le personnel soignant et les surfaces. »

Source : Organisation Mondiale de la Santé, Hygiène hospitalière et contrôle des infections.

Gants antimicrobiens Abena : Innovation mondiale qui révolutionne la prévention des infections.

- Choisir les gants antimicrobiens, c'est dresser une barrière supplémentaire contre les infections nosocomiales (SARM, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, E-Coli...).
- Premiers gants nitrile antimicrobiens sans lixiviation.
 - Offrent une protection active contre les infections nosocomiales.
 - Éliminent jusqu'à 99.99% des bactéries ciblées.
 - Aucun impact sur la résistance bactérienne.

Pour en savoir plus...
http://www.abena-frantex.fr/Gants_antimicrobiens

L'hygiène et la protection de la personne

Sacs de recueil hygiéniques

Chaque année, environ 750 000 français sont touchés par des infections nosocomiales associées aux soins au sein même des établissements de santé. Ces infections accroissent le risque de complications, augmentent la résistance aux antibiotiques et peuvent même provoquer des décès et des pertes financières énormes pour le système de santé.

Source : INSERM, information en santé.

Notre approche globale des soins de continence tient compte du rôle du soignant et met l'accent sur la prévention ainsi que sur le traitement approprié des affections liées à l'incontinence à travers une approche structurée de l'hygiène.

Gestion des excréta

Il est important de noter que les fluides corporels, tels que l'urine et les selles par exemple, peuvent contenir des bactéries susceptibles de causer des infections. Par conséquent, vous devez gérer leur mise au rebut avec la plus grande attention.

Les sacs de recueil hygiéniques INCOBAG représentent **la solution rapide, facile et hygiénique de gestion des excréta**. Ces sacs en plastique, résistants aux fluides et dotés de sangles de fermeture et d'un tampon super absorbant, sont conçus pour collecter l'urine ou les selles. Le tampon super absorbant convertit le liquide en gel et **absorbe rapidement les liquides avec contrôle des odeurs**.

La gamme se compose de 4 modèles, conçus pour différentes utilisations



Protège seuil pour siège d'aisance

Protège bassin

Urinal

Vomitoire



Protection de la personne

L'hygiène personnelle

Les mains sont le principal vecteur de transmission des germes. Une hygiène sérieuse et efficace des mains est donc l'une des étapes les plus importantes pour éviter la transmission des infections nosocomiales associées aux soins.

- Notre gel hydroalcoolique contient de l'aloë vera pour ne pas dessécher les mains.
- Disponibles en différents formats, de la version de poche (100ml), à la version pour les lieux à fort trafic (1000ml).



Equipements de protection

Les vêtements de protection constituent la base des bonnes pratiques d'hygiène. Notre gamme de vêtements de protection inclut **un large choix pour la protection des résidents, des visiteurs et des soignants**. De la tête aux pieds, notre vestiaire à usage unique habille confortablement et protège chaque utilisateur.

- Coiffants et masques.
- Blouses de protection.
- Chaussants.
- Tabliers.
- Grandes serviettes (Bavoirs).



LES CONSEILS DES SPÉCIALISTES

Notre gamme de grandes serviettes dispose d'un modèle réutilisable et lavable à 60°C. L'utilisation de grandes serviettes pendant les repas est fortement recommandée pour les résidents atteints de troubles cognitifs. Cela permet de veiller à leur autonomie avec le « manger main ».

Ensemble, nous pouvons garantir un lieu de travail sûr. 4 conseils pour la prévention des infections:

1. Éviter la contamination croisée : Ne jamais mettre en contact quelque chose de contaminé avec quelque chose de propre.
2. Nettoyer ou jeter : Ce qui est contaminé doit être nettoyé ou jeté.
3. Garantir l'hygiène de base : Observer une hygiène personnelle et des mains appropriée.
4. Se protéger : Utiliser des vêtements de protection et des gants adaptés de la bonne manière.



Gestion des déchets

Déchets d'activités de soins

Notre approche structurée de l'hygiène s'étend jusqu'à la gestion de vos déchets. Les déchets comme les produits d'incontinence souillés, les protections à usage unique, les gants, etc. doivent être gérés immédiatement pour maintenir un environnement sain et éviter les contaminations croisées.

L'offre Abena, c'est également vous proposer:

- Des supports de sacs mobiles adaptés à l'activité hospitalière (robustes et silencieux).
- Un large choix de sacs-poubelle (classiques, tri sélectif, housses pour containers...).
- Une gamme de produits homologuée au traitement des D.A.S.R.I (sacs poubelles, cartons et collecteurs).

La gestion des déchets d'incontinence est une tâche considérable dans la plupart des établissements de soins. Plus les déchets sont présents, plus leurs effets indésirables se font ressentir (exposition, manque de place, bactéries, germes, odeurs agressives).

La solution Abena Vac ou la manière simple de compresser et sceller les déchets

Amélioration de l'hygiène

- Pas d'odeur issue des déchets d'incontinence.
- Les germes sont scellés à l'aide d'un filtre d'hygiène.
- Réduction des risques d'infection.
- Facile d'entretien avec sa surface en acier inoxydable.

Simple d'utilisation

- Un bouton « start » pour la mise en marche.
- Les sacs scellés sont plus faciles à transporter.

Réduction du volume jusqu'à 50%

- Moins de ramassages ou moins de surface de stockage nécessaire
- Réduction des dépenses liées à la gestion des déchets.



LES CONSEILS DES SPÉCIALISTES

Les conseils pour prévenir les contaminations croisées relatifs à la gestion des déchets de soins de continence :

1. Utiliser un petit sac poubelle individuel pour jeter les protections d'incontinence souillées et fermer ce sac avant de sortir de la chambre.
2. Privilégier une poubelle ou un support de sacs munis d'une ouverture à pédale pour éviter les contacts avec les couvercles ou poignées lorsque vous jetez ce sac.
3. Éliminer ces déchets dans le circuit des ordures ménagères. En cas de suspicion de bactéries pathogènes ou de virus (ex. diarrhées infectieuses), ces déchets sont à éliminer par la filière D.A.S.R.I.



Une approche globale

Grâce à une approche globale, Abena a pour objectif d'être votre fournisseur de solutions complètes, votre fournisseur de confiance. En plus des solutions pour la prise en charge de l'incontinence, nous proposons des milliers de produits afin de couvrir tous les besoins quotidiens.

Cela inclut, entre autres :



LE SOINS
DES PLAIES

L'ESSUYAGE
PAPIER

L'HYGIÈNE
DES
SURFACES

LA NUTRITION



Nos équipes sont prêtes à vous accompagner, contactez-nous !



Cet imprimé est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Abena-Frantex SA · 5 rue Thomas Edison · 60180 Nogent sur Oise · France
Tel.: 03 44 65 68 80 · www.abena-frantex.fr