



Navodila za nameščanje

November 2022



Čim manjši pripomoček, - a dovolj vpojen za različne potrebe

ABENA ima širok nabor pripomočkov, ki pokrivajo individualne potrebe in želje posameznikov. Pri njihovem razvoju namenjamo posebno pozornost kakovosti življenja in udobju osebe, ki jih uporablja ter optimalni zaščiti pred iztekanjem.

Ključno je, da koža ostane suha, in da se uporabnik ves čas počuti varno in udobno. Obstajata dva pomembna vidika. Prvi je, da pripomoček pravilno namestimo in pričvrstimo tako, da lahko zagotavlja optimalno zaščito pred iztekanjem in je udoben. Drugi vidik je izbira prave velikosti pripomočka. Ta naj bo čim manjši oz. tanjši, a dovolj velik oz. vpojen za potrebe uporabnika. Majhni in tanki pripomočki omogočajo uporabniku neovirano gibanje in so prijaznejši do kože. Priporočljivi so tudi z vidika zmanjšanja porabe naravnih virov.

Naši pripomočki so na voljo v različnih velikostih in z različno stopnjo vpojnosti, da lahko zadovoljimo individualne potrebe vseh uporabnikov.

Splošne smernice za nameščanje pripomočka:

- Pred nameščanjem pripomočka si umijte roke ali jih razkužite. Oskrbovalci morajo uporabljati rokavice za enkratno uporabo.
- Pripomoček prepognite po dolžini, da ustvarite žleb.
- Ne dotikajte se notranjosti pripomočka, da preprečite oz. zmanjšate okužbe sečil.
- Pripomoček se mora tesno prilegati mednožju.
- Pripomoček nameščajte od spredaj nazaj, odstranjujte pa ga vedno od zadaj naprej.
- Pripomočke ABENA San v velikostih 5–11 je treba vedno uporabljati s posebnimi fiksirnimi hlačkami, da se zagotovi dobro prileganje in zmanjša tveganje iztekanja.


Pomembne informacije

Izberite pravilno velikost pripomočka za inkontinenco.

- Izmerite obseg bokov v najširšem predelu. Izбира prave velikosti pomaga pri preprečevanju iztekanja.



Pravilna velikost
pripomočka

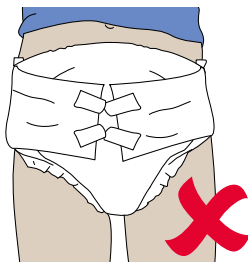

Nepravilna velikost /
prevelik pripomoček


Kako pogosto je potrebno zamenjati pripomočke?

- Pripomoček je treba zamenjati vedno, ko je poln.
- Podnevi pripomoček menjamo vsake 3 do 4 ure. Menjamo ga tudi pred spanjem.
- Ponoči je mogoče pripomoček nositi do 8 ur (odvisno od vpojnosti), da zagotovimo dober spanec.
- Vsi pripomočki (razen manjših Abena San 1–4 in Abena Light, ki se prilepijo na spodnje perilo) imajo na zunanji strani pripomočka indikator z lestvico, ki pokaže kolikšen del pripomočka je že izkoriščen. Dve rumeni črti se obarvata v modro. Če pripomoček ob menjavi ni popolnoma izkoriščen, se lahko naslednjič izbere pripomoček z nižjo vpojnostjo.

ABENA Fix

Pravilna pričvrstitev – pomemben dejavnik zaščite pred iztekanjem


ABENA ima širok nabor izdelkov za pričvrstitev pripomočkov, ki so namenjeni različnim uporabnikom, linija teh izdelkov pa je prilagojena potrebam po različnih velikostih.

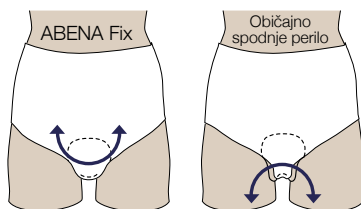

- V primerjavi z običajnim spodnjim perilom imajo fiksne hlačke ABENA Fix širši mednožni predel in večjo elastičnost, kar zagotavlja boljšo pričvrstitev predloge in odlično zaščito pred iztekanjem.
- Pri izdelkih ABENA San v velikostih 5–11 priporočamo uporabo posebnih fiksirnih hlačk (bombažne hlačke s hlačnicami ali brez), da se zagotovi dobro prileganje in zmanjša tveganje iztekanja.

Obseg bokov

Za optimalno pričvrstitev in popolno prileganje je pomembna izbira prave velikosti. Odločilni dejavnik je obseg bokov, ki ga izmerimo z merilnim trakom, in sicer v najširšem predelu bokov.

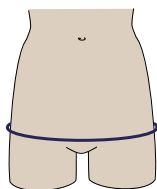

Vsaka velikost izdelka pokriva širok razpon različnih obsegov bokov. Priporočamo, da izberete velikost izdelka, ki se ujema z izmerjenim obsegom bokov. Upoštevajte, da se posamezne velikosti prekrivajo. Zato sta za vaše potrebe lahko ustrezni dve velikosti izdelkov. V tem primeru izberite velikost, ki v povprečju najbolj ustreza izmerjeni vrednosti.

Barvna oznaka

XS	→		Sistem barvnega označevanja omogoča preprosto iskanje prave velikosti izdelka ABENA Fix. Barvna oznaka v obliki barvne niti na pasu hlačk in na embalaži je navedena na vseh velikostih fiksirnih hlačk.
S	→		
M	→		
L	→		
XL	→		
2XL	→		
3XL	→		
4XL	→		
5XL	→		
6XL	→		

Dnevnik uriniranja



Dnevnik uriniranja

Ime: _____ Datum rojstva: _____

Katere pripomočke uporabljate, naziv
ali šifra art.:

Podnevi:	Ponoči:
----------	---------

Čas menjave pripomočka za inkontinenco	Število enot indikatorja, ki so spre- menile barvo	Mokra oblačila ali postelja		Iztekanje blata		Vmesni obisk stranišča		Uriniranje / odvajanje blata med obiski stranišča		Vrsta novega pripomočka za inkontinenco, ki je bil uporabljen	Podpis
		Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da (2 uri / 8 odvajanje blata)	Ne		
Dan 1	Ob										
Datum:	Ob										
	Ob										
	Ob										
	Ob										
	Ob										
	Ob										

Čas menjave pripomočka za inkontinenco	Število enot indikatorja, ki so spre- menile barvo	Mokra oblačila ali postelja		Iztekanje blata		Vmesni obisk stranišča		Uriniranje / odvajanje blata med obiski stranišča		Vrsta novega pripomočka za inkontinenco, ki je bil uporabljen	Podpis
		Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da (2 uri / 8 odvajanje blata)	Ne		
Dan 2	Ob										
Datum:	Ob										
	Ob										
	Ob										
	Ob										
	Ob										
	Ob										


Čas menjave pripomočka za inkontinenco	Število enot indikatorja, ki so spre- menile barvo	Mokra oblačila ali postelja		Iztekanje blata		Vmesni obisk stranišča		Uriniranje / odvajanje blata med obiski stranišča		Vrsta novega pripomočka za inkontinenco, ki je bil uporabljen	Podpis
		Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da (2 uri / 8 odvajanje blata)	Ne		
Dan 3	Ob										
Datum:	Ob										
	Ob										
	Ob										
	Ob										
	Ob										
	Ob										

Skenirajte kodo QR
za dnevnik uriniranja.



Indikator vpojnosti z merilno lestvico

- Indikator vpojnosti je sestavljen iz dveh rumenih črt, natisnjenih na hrbtni strani izdelka. Pri mokrem izdelku rumeni črti postaneta modri, kar kaže, kdaj je treba pripomoček zamenjati.
- Indikator vpojnosti z merilno lestvico pokaže oskrbovalcu, kolikšen delež zmogljivosti pripomočka je bil izkoriščen.
- Oskrbovalcu in uporabniku je v pomoč pri izbiri pripomočka s pravo stopnjo vpojnosti, kar je skladno z našim splošnim ciljem: "Čim manjši oz. tanjši izdelek, a dovolj vpojen za potrebe uporabnika".

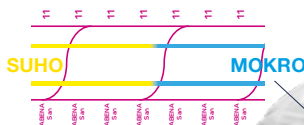

LEA0177SL01 2023/AGDM

Z dnevnikom uriniranja boste zlahka ugotovili ali imate najustreznejši pripomoček za inkontinenco.

Kaj nam pove dnevnik uriniranja, ko je izpolnjen:

- Kako izkoriščen je pripomoček.
- Kako pogosto in kdaj je bil pripomoček zamenjan.
- Ali je prišlo do iztekanja.
- Ali je prišlo do izločanja blata med uporabo pripomočka ali med obiskom stranišča.
- Kako pogosto uporabnik obišče stranišče.


Ko je obrazec izpolnjen, je treba opraviti ocenjevanje in preveriti ali je treba kaj spremeniti ali prilagoditi.

Priporočene prilagoditve so lahko povečanje števila obiskov stranišča, izbira manjšega ali večjega pripomočka, izbira višje ali nižje stopnje vpojnosti itn.

ABENA San


ABENA Man Special

ABENA Nova San

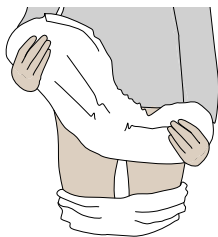

1

Povlecite fiksirne hlačke do kolen. Predlogo prepognite po dolžini, da nastane žleb, hrbtna stran pa naj bo obrnjena navzven. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

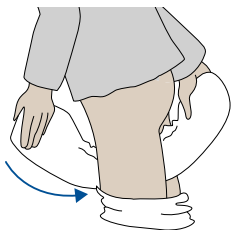

2

Predlogo namestite med noge v smeri od spredaj nazaj.




3

Predlogo tesno namestite v predel dimelj, tako da je hrbtna stran predloge obrnjena stran od kože. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini. Ne velja za izdelke ABENA Nova.




Izdelke ABENA San v velikostih 5–11 je treba vedno uporabljati s posebnimi fiksirnimi hlačkami, da se zagotovi dobro prilaganje in zmanjša tveganje iztekanja. Oglejte si strani 4–5.

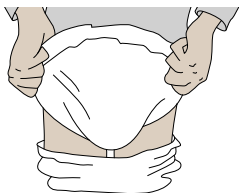


4

Razširite hrbtno stran predloge v vodoravni smeri, da med nogami nastane skledasta oblika. Prepričajte se, da se pripomoček tesno prilega zadnjici in predelu dimelj. Poravnajte robove.

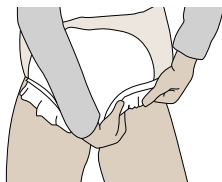

5

Razširite sprednji del predloge v vodoravni smeri in potegnite sprednji del fiksirnih hlačk preko sprednjega dela predloge.

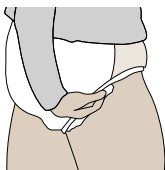

6

Poravnajte hrbtni del hlačk in poskrbite, da so hlačnice hlačk nameščene čez rob predloge. Poravnajte robove predloge in jih potegnite izpod fiksirnih hlačk, da ne ustvarjajo trenja na koži.




Naša filozofija pravi: Čim manjši oz. tanjši izdelek, a dovolj vpojen za potrebe uporabnika.

ABENA San


ABENA Man Special

ABENA Nova San

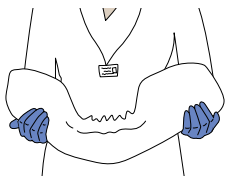

1

Prepognite predlogo po dolžini s hrbtno stranjo obrnjeno navzven, da nastane žleb. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

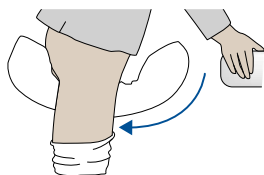

2

Prepričajte se, da ima uporabnik potrebno oporo in povlecite predlogo v smeri od spredaj nazaj. Namestite zadnji, razširjeni del predloge na trtico.



3

Razprite hrbtno stran predloge v vodoravni smeri, da med nogami nastane skledasta oblika. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini. Ne velja za izdelke ABENA Nova.




Izdelke ABENA San v velikostih 5–11 je treba vedno uporabljati s posebnimi fiksirnimi hlačkami, da se zagotovi dobro prilaganje in zmanjša tveganje iztekanja. Oglejte si strani 4–5.




4

Razprite sprednji del predloge v vodoravni smeri. Prepričajte se, da se pripomoček tesno in udobno prilega zadnjici in predelu dimelj.

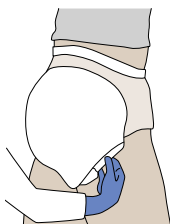

5

Povlecite fiksne hlačke čez predlogo. Če je mogoče, namestite hlačnice hlačk čez rob pripomočka.

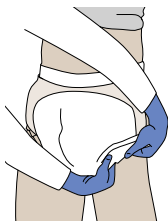

6

Na sprednjem delu poravnajte fiksne hlačke in poskrbite, da se robovi predloge lepo prilegajo predelu dimelj.




Naša filozofija pravi: Čim manjši oz. tanjši izdelek, a dovolj vpojen za potrebe uporabnika.

ABENA San


ABENA Man Special

ABENA Nova San

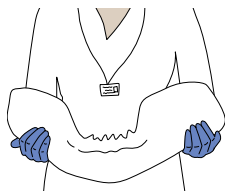


1

Prepognite predlogo po dolžini, da nastane žleb, hrbtna stran pa naj bo obrnjena navzven. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

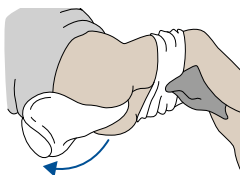

2

Povlecite prepognjeno predlogo od spredaj nazaj, da med nogami nastane skledasta oblika. Če je treba, si postopek olajšajte tako, da med kolena položite brisačo.

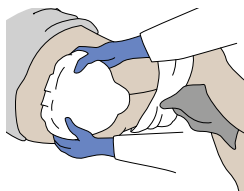

3

Razširite hrbtno stran predloge v vodoravni smeri in namestite zgornji konec na trtico. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini. Ne velja za izdelke ABENA Nova.




Izdelke ABENA San v velikostih 5–11 je treba vedno uporabljati s posebnimi fiksirnimi hlačkami, da se zagotovi udobno prilaganje in zmanjša tveganje iztekanja. Oglejte si strani 4–5.

Videoposnetki s prikazi nameščanja
so ob posameznih pripomočkih




Uporaba v ležečem
položaju ob pomoči
druge osebe

Dvodelni sistem

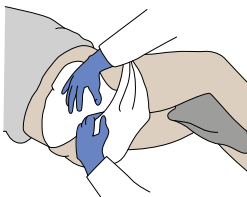


4

Povlecite fiksne hlačke navzgor.

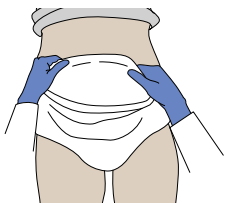

5

Uporabniku dovolite, da leži na hrbtu in razprite predlogo na sprednjem delu. Nastati mora skledasta oblika v predelu dimelj, predloga pa se mora pri tem tesno prilegati telesu.

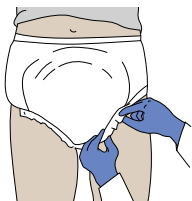

6

Prilagodite fiksne hlačke v sprednjem delu. Če je mogoče, namestite hlačnice hlačk čez rob predloge.



Naša filozofija pravi: Čim manjši oz. tanjši izdelek, a dovolj vpojen za potrebe uporabnika.




ABENA Man



1

Razgrnite predlogo. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

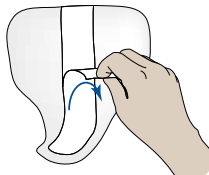


2

Odstranite zaščitni trak, da pridete do samolepilnega traku.



3

Namestite predlogo v fiksne hlačke ali običajne spodnje hlačke, pri čemer naj bo širši del predloge zgoraj.

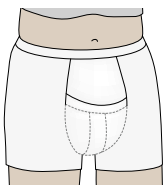

4


Oblecite fiksne hlačke ali običajne spodnje hlačke.



Za uporabo izdelkov ABENA Man Special si oglejte strani 8–13.



ABENA Pants

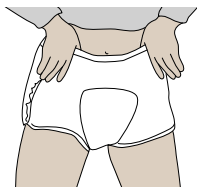

1

Oblecite vpojne hlačke, kot praviloma oblačite spodnjice. Ne dotikajte se notranjosti vpojnih hlačk.



2

Po uporabi ali pri menjavi po šivu raztrgajte stranski del vpojnih hlačk.



3

Ko sta obe strani vpojnih hlačk raztrgani, jih zvijte, zalepite s pritrjenim trakom na hrbtni strani in odvrzite.

ABENA Slip


ABENA Slip FLEXI FIT

ABENA Nova Form



1

Prepognite hlačno predlogo po dolžini, da nastane žleb, hrbtina stran hlačne predloge naj bo obrnjena navzven. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

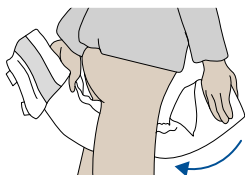


2

Povlecite prepognjeno hlačno predlogo od spredaj nazaj.



3

Razširite sprednji del hlačne predloge v vodoravni smeri. Namestite stranske trakove hlačne predloge v smeri proti bokom. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini. Ne velja za izdelke ABENA Nova.

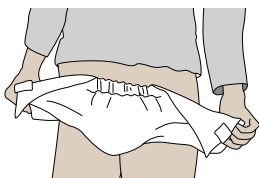

4

Razširite hrbtni del hlačne predloge v vodoravni smeri. Prepričajte se, da se tesno prilega predelu dimelj, pri čemer naj bo hrbtina stran obrnjena navzven.



5

Pričvrstite spodnje trakove na obeh straneh. To naredite rahlo pod kotom v smeri diagonalno navzgor, da izboljšate prileganje okoli nog.



6

Zgornje trakove pritrdite v smeri diagonalno navzdol proti indikatorju.



7

Prepričajte se, da se robovi hlačne predloge lepo spuščajo v predel dimelj, pri čemer poravnajte robove pripomočka stran od kože.




Kombinirane trakove z ježki lahko večkrat prilepite in odlepate.

ABENA Slip


ABENA Slip FLEXI FIT

ABENA Nova Form

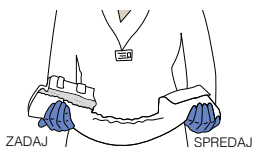


1

Prepognite hlačno predlogo po dolžini, da nastane žleb, hrbtina stran hlačne predloge naj bo obrnjena navzven. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

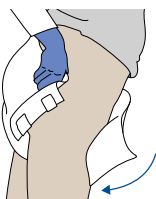

2

Povlecite v žleb prepognjeno hlačno predlogo od spredaj nazaj. Namestite zadnji konec pripomočka na trtico.

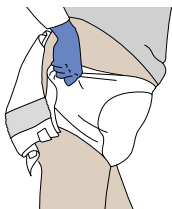

3

Razširite sprednji del hlačne predloge, da med nogami nastane skledasta oblika. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini. Ne velja za izdelke ABENA Nova.



Linija ABENA Slip FLEXI FIT s prilagodljivimi bočnimi deli omogoča udobno prileganje, ki ustreza različnim postavam.

Videoposnetek s prikazom uporabe je
ob posameznem pripomočku




Uporaba v
pokončnem položaju
ob pomoči druge
osebe

Izdelek »vse v enem«




4

Pričvrstite spodnje trakove na obeh straneh. To naredite rahlo pod kotom v smeri diagonalno navzgor, da izboljšate prileganje okoli nog.

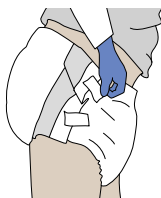

5

Zgornje trakove pritrdite v smeri diagonalno navzdol proti indikatorju.

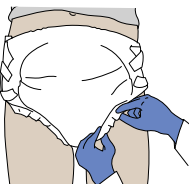

6

Prepričajte se, da se robovi hlačk hlačne predloge lepo spuščajo v predel dimelj, pri čemer poravnajte robove pripomočka stran od kože.




Kombinirane trakove z ježki lahko večkrat prilepite in odlepate.

ABENA Slip


ABENA Slip FLEXI FIT

ABENA Nova Form

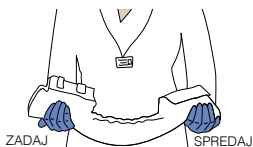


1

Prepognite hlačno predlogo po dolžini, da nastane žleb, hrbtna stran hlačne predloge naj bo obrnjena navzven. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

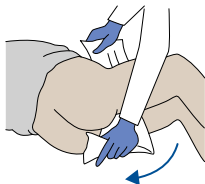


2

Uporabnik naj leži na boku. Povlecite hlačno predlogo od spredaj nazaj. Če je treba, si postopek olajšajte tako, da med kolena položite brisačo.

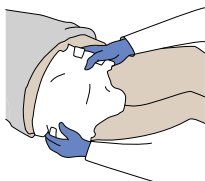

3

Razprite hrbtni del hlačne predloge. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini. Ne velja za izdelke ABENA Nova.

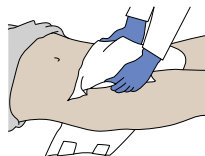

4

Uporabnik naj se uleže na hrbet. Razprite sprednji del hlačne predloge, da med nogami nastane skledasta oblika.



Linija ABENA Slip FLEXI FIT s prilagodljivimi bočnimi deli stranskimi trakovi omogoča udobno prileganje, ki ustreza različnim postavam.




5

Spodnje trakove na obeh straneh pritrdite rahlo pod kotom v smeri diagonalno navzgor, da izboljšate prileganje okoli nog.



6

Zgornje trakove pritrdite v smeri diagonalno navzdol proti indikatorju.

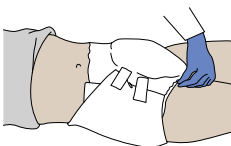

7

Prepričajte se, da se robovi hlačne predloge lepo spuščajo v predel dimelj, pri čemer poravnajte robove pripomočka stran od kože.




Kombinirane trakove z ježki lahko večkrat prilepите in odlepите.

ABENA Wing



1

Razgrnite hlačno predlogo s pasom in jih prepognite po dolžini, da nastane žleb, hrbtne strani pa naj bo obrnjena navzven. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

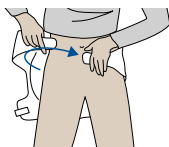

2

Pas okoli bokov pritrdite z ježki.



3

Povlecite hlačno predlogo od zadaj naprej. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini.



4

Sprednji del hlačne predloge pritrdite okoli pasu s kombiniranimi pritrdilnimi trakovi na vsaki strani.



5


Prepričajte se, da se robovi hlačne predloge s pasom lepo spuščajo v predel dimelj, poravnajte robove pripomočka stran od kože.



Prepričajte se, da se hlačne predloge tesno prilegajo in so udobne za uporabnika. Če se pripomoček v predelu dimelj ne prilega, potegnite pas višje na boke in znova pričvrstite z ježki.

ABENA Wing

1

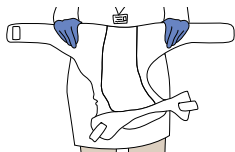


Razgrnite hlačno predlogo s pasom in jo prepognite po dolžini, da nastane žleb, hrbtne strani pa naj bo obrnjena navzven. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

2



Pas okoli bokov pritrdite z ježki.

3

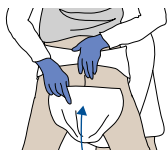

Povlecite hlačno predlogo od spredaj nazaj. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini.

4



Sprednji del hlačne predlog pritrdite okoli pasu s kombiniranimi pritrdilnimi trakovi na vsaki strani.

5



Prepričajte se, da se robovi hlačne predloge s pasom lepo spuščajo v predel dimelj, pri čemer poravnajte robove pripomočka stran od kože.




Kombinirane trakove z ježki lahko večkrat prilepite in odlepate.



Pri pravilnem nameščanju in uporabi pripomočkov vedno sledite ustreznim smernicam, ki jih pripravi zdravstvena stroka.

ABENA Wing

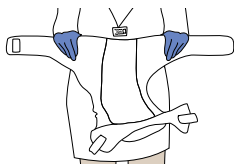


1

Razgrnite hlačno predlogo s pasom in jih prepognite po dolžini, da nastane žleb, hrbtna stran pa naj bo obrnjena navzven. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.



2

Pas okoli bokov pritrdite z ježki.

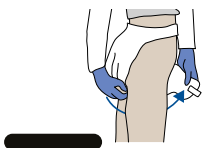


3

Povlecite hlačno predlogo od zadaj naprej.



4

Sprednji del hlačne predloge s pasom pritrdite okoli pasu s kombiniranimi pritrdilnimi trakovi na vsaki strani. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico, lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini.

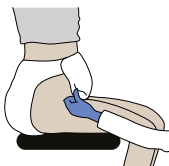

5

Prepričajte se, da se robovi hlačne predloge lepo spuščajo v predel dimelj, pri čemer poravnajte robove pripomočka stran od kože.




Pas na izdelkih iz linije ABENA Wing je na splošno daljši kot pri drugih proizvajalcih, zato načeloma ne boste potrebovali podaljškov pasu.




Prepričajte se, da se hlačne predloge s pasom tesno prilegajo in so udobne za uporabnika. Če se pripomoček v predelu dimelj ne prilega, potegnite pas višje na boke.

ABENA Wing

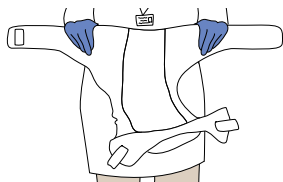


1

Razgrnite hlačno predlogo s pasom in jo prepognite po dolžini, da nastane žleb, hrbtna stran pa naj bo obrnjena navzven. Ne dotikajte se notranjosti pripomočka.

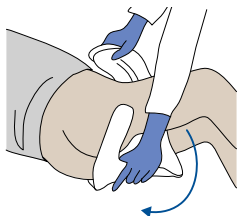

2

Uporabnik naj leži na boku. Povlecite hlačno predlogo s pasom od spredaj nazaj. Glede na položaj indikatorja vpojnosti z merilno lestvico lahko preverite, ali je pripomoček pravilno nameščen na sredini. Če je treba, si postopek olajšajte tako, da med kolena položite brisačo.

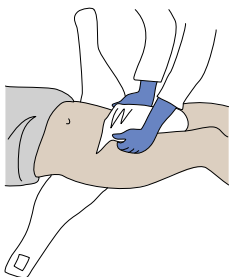

3


Uporabnik naj se uleže na hrbet. Povlecite hlačno predlogo s pasom od zadaj naprej.



Kombinirane trakove z ježki lahko večkrat prilepite in odlepite.


4

Pas okoli bokov pritrdite z ježki.

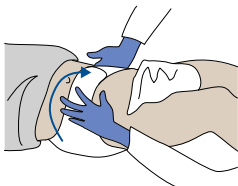


5

Sprednji del hlačne predloge pritrdite okoli pasu s kombiniranimi pritrdilnimi trakovi na vsaki strani.

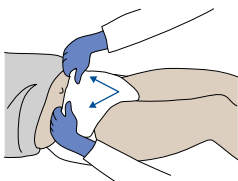

6

Prepričajte se, da se robovi hlačne predloge s pasom lepo spuščajo v predel dimelj, poravnajte robove pripomočka stran od kože.

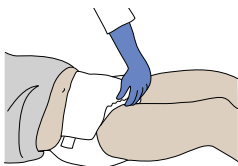

Prepričajte se, da se hlačne predloge s pasom tesno prilegajo in so udobne za uporabnika. Če se pripomoček v predelu dimelj ne prilega, potegnite pas višje na boke.



MADE IN THE USA

Model 100
100% Cotton
100% Polyester

Smernice za uporabo izdelkov ABENA Nova

Pritrjevanje
sponke
na izdelke ABENA Nova


- Pri pritrditvi sponke s senzorjem se ne dotikajte predloge.
- Pred nameščanjem pripomočka oskrbovancu namestite sponko s senzorjem na pas pripomočka.
- Modra stran sponke mora biti obrnjena navzven.
- V aplikaciji WetSens Monitor preverite ali sponka deluje.
- Sponko očistite s krpicami za dezinfekcijo.
- Samo za izdelke ABENA Nova Slip M2, M4, L2 in L4. Potegnite netkan material stran od linij senzorja. Netkan material ni namenjen za vstavljanje v sponko.

ABENA Nova



1

Pogled od spredaj na izdelek ABENA Nova s sponko MediSens.

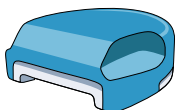

2

Pogled s strani na izdelek ABENA Nova s sponko MediSens.




3

Sponka je pritrjena na zavihek na vrhu (na pasu) pripomočka za inkontinenco.



4

Zavihek je na hrbtnem delu pasu ojačan za lažje nameščanje sponke.

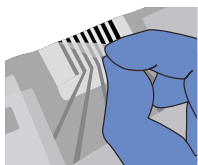


5

Samo za izdelke ABENA Nova Slip M2, M4, L2 in L4. Potegnite netkan material stran od zavihka. Netkan material ni namenjen za vstavljanje v sponko.


Pritrjevanje sponke

na izdelke ABENA Nova

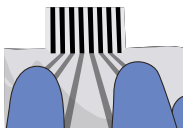


6

Odkrijte zavihek (odmaknite netkan material) za lažjo pritrditev.

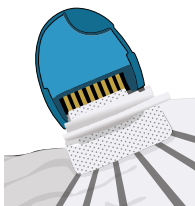


7

Odprite pokrov sponke in jo pritrdite na zavihek.

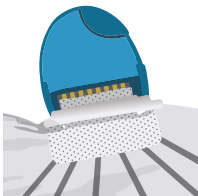

8

Prepričajte se, da je sponka pravilno pritrjena na zavihek.

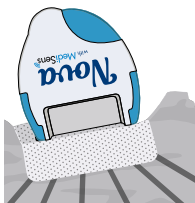

9

Zaprite pokrov sponke MediSens s senzorjem na izdelku ABENA Nova. Modra stran sponke mora biti obrnjena navzven in vidna na zunanji strani izdelka. Spremljajte stanje sponke v aplikaciji WetSens Monitor.

Vse videoposnetke s prikazi uporabe najdete na
<https://www.abena-helpi.si/nega-in-oskrba/izdelki-za-inkontinenco> s klikom na posamezni izdelek.