

Kako pravilno uporabljati obrazno masko



1 Umijte ali razkužite roke, predno si namestite masko oz. se je dotaknete.



2 Poskrbite, da je ustrezna stran maske obrnjena navzven – zunanja stran je praviloma obarvana.



3 Poiščite nosni del maske in ga namestite na nosni most.



4 Ušesno zanko zataknete za ušesa.



5 Razprite masko in preverite, ali v celoti prekriva usta in nos. Spodnji del naj sega pod brado.



6 Upognite nosni del maske, da se prilagodi obliki vašega nosu.



7 Z odstranjevanjem maske začnite pri ušesnih zankah. Maske se ne dotikajte.



8 Masko odvrzite v zaprt koš. Pri tem se izognite dotiku koša za smeti.



9 Umijte ali razkužite roke.



Med nošenjem maske se le-te ne dotikajte. V primeru, da se dotaknete maske, si umijte ali razkužite roke.



Pazljivi bodite, če maska postane vlažna. V tem primeru je ne smete ponovno uporabiti.